


# VISIÈRE FACIALE PLIABLE

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

👉 Lavez-vous les mains avant le montage 👉


Cliquez la 1ère languette

1

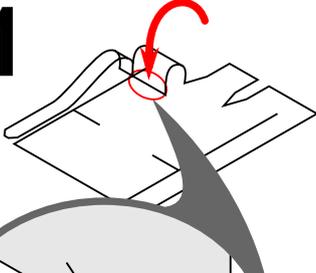


Cliquez la 2nde languette

2

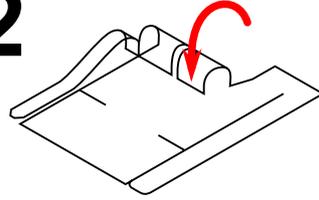


Cliquez la 3ème languette

3

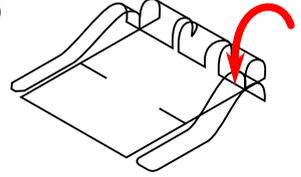


Pliez à gauche

4

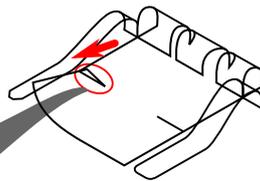



Pliez à droite

5

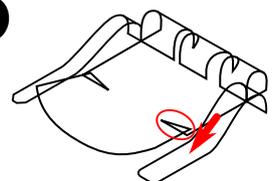


Fixez la sangle


6

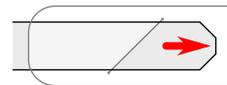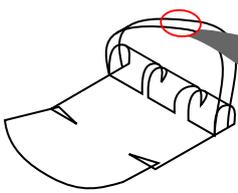

a) Insérez la petite sangle dans la fente

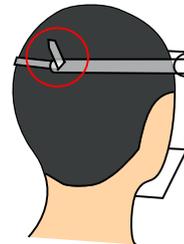


b) Réglez la longueur sur votre tête

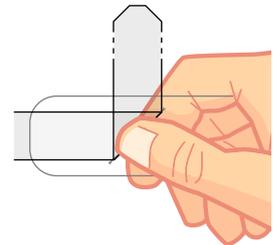


c) Marquez le pli

NB: Methode alternative (si vous n'êtes pas un marin) : Mettez un morceau de scotch

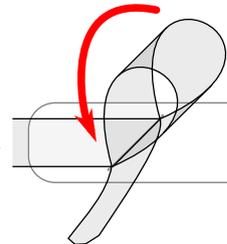

d) Repassez la sangle dans la fente

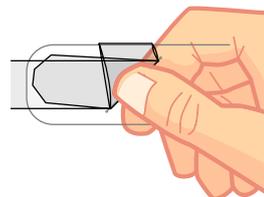

e) Pincez pour sécuriser

NB: le bout de la petite sangle doit être à l'horizontale

Et voilà !



Ne convient pas à la protection chimique des liquides ou des vapeurs.  
Portez des protections complémentaires si nécessaire.