


VISIERE FACIALE PLIABLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Pliez la 1ère languette

1

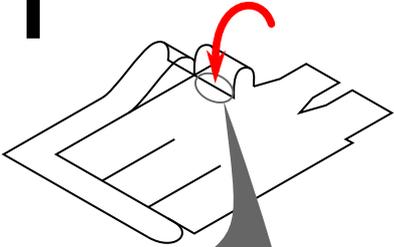


Pliez la 2nde languette

2

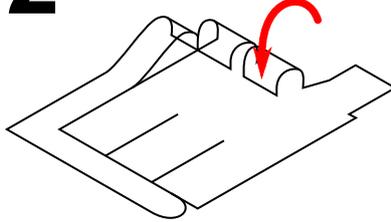


Pliez la 3ème languette

3

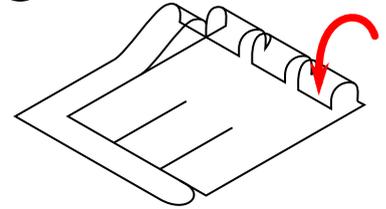


Accrochez la bande gauche

4

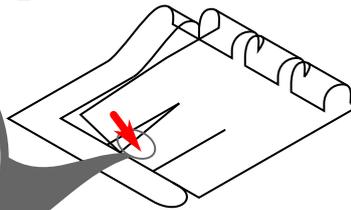



Accrochez la bande droite

5

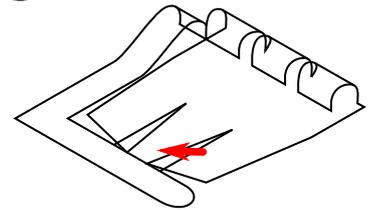


Fixez la sangle


6

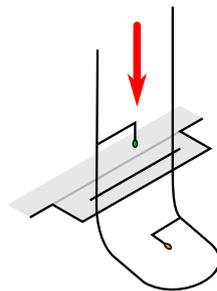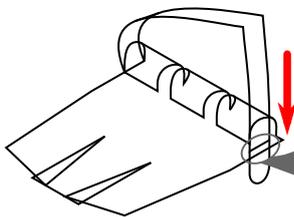


Mettez la sangle
dans la fente

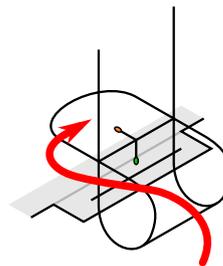

Assemblez
les encoches

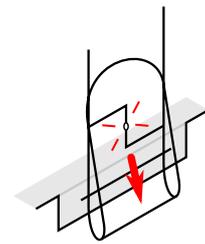

Tirez pour aligner
les cercles

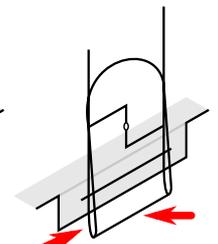

Pincez
pour sécuriser

Et voilà !



Portez des protections complémentaires si nécessaire.

Ne convient pas à la protection chimique
des liquides ou des vapeurs.

